



Grattis till Nattugla.

Du har nu fått Nattugla og er redo att komma igång.

Här hittar du användbar information för installation og möbelskanning.

- Hur man installerar Nattugla.
- Brandvägg og nätverk.
- Möbelskanning.

- Information som kan ges till patienter og anhöriga.
- Information som kan ges till vårdpersonal.

Administratör av Nattugla.

Du loggar in på kundadministrationen genom att klicka på länken du fick via e-post. I e-postmeddelandet du fick hittar du även ditt användarnamn og lösenord. (t.ex. organisasjon.nattugla.no/admin)

Grupper bestemmer hvilke helsearbeidere som skal ha tilgang til hvilke pasienter.

OBS - dersom du benytte Hepro, Zafe, NettNordic mobil app kan du hoppe til neste punkt

1. [Lag grupper for Pasient og Personalet - gi dem tilgang til pasientgrupper](#)
2. [Opprett brukere til personell](#)
3. [Opprett bruker for pasienter](#)
4. [Knytt ugler til pasient](#)

Tilsyn direkte via Nattugla

Logg på med mottatt brukernavn og passord på ditt Nattugla område eks demo.nattugla.no

Superbruker innlogging i dette eks. demo.nattugla.no/admin



For å kunne motta alarmer, må alarmer aktiveres i Nattugla kundeportal. Velg om anonymisering skal være på eller av.

1. [Aktiver alarmer for pasienter](#)
2. [Aktiv/deaktiver anonymisering](#)

Innstillinger i Hepro respons

Logg inn på <https://hepro.skyresponse.com/admin/#login> med din admin bruker.

1. [Legg inn planlagt tilsyn](#)
2. [Ignorer alarmer for valgte tidspunkt](#)

For Helsepersonell

3. [Ta et tilsyn med Hepro App](#)
4. [Toveis tale i et tilsyn](#)

Ved behov for hjelp, ring support + 47 4000 4443